

Otrivin Natural Aloe Vera

Neusspray

Natuurlijke, isotone zeewateroplossing met reinigende en verzachtende eigenschappen
Zachte spray met Aloë vera



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig vóór het gebruik van Otrivin Natural Aloe Vera. Raadpleeg uw arts of apotheker als u nog vragen heeft.

De neus speelt een cruciale rol bij het verwarmen en bevochtigen van de ingeademde lucht en bij het filteren van kleine deeltjes uit de lucht. Dit beschermt de onderste luchtwegen tegen stof, irritatie en droogheid. Daarom is het belangrijk om de neusholtes schoon en bevochtigd te houden, zodat de neus alle functies goed kan vervullen.

1. Wat is Otrivin Natural Aloe Vera en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Otrivin Natural Aloe Vera neusspray is een isotone zeewateroplossing zonder conserveermiddelen en 100% natuurlijk.

Dit product bevat ook natuurlijk poeder van de aloë vera plant, die bekend staat om zijn verzachtende en hydraterende eigenschappen.

Otrivin Natural Aloe Vera wordt aanbevolen om:

- Zachtjes de neusholten te reinigen wanneer deze verstopt zijn bv. tijdens een verkoudheid of bij allergische aandoeningen, door het wegwassen van het overtollige slijm, stof, pollen of andere deeltjes in de lucht die in de neus zitten;
- Het verzachten van de geïrriteerde neusholtes;
- Het geïrriteerde of droge neusslijmvlies te hydrateren in het geval van lichte neusirritaties of als gevolg van een lage luchtvochtigheid (bv. als gevolg van verwarmde ruimtes, ruimtes met airconditioning, bij grote hoogte, vliegvluchten);
- Verdunt neusafscheidingen, maakt ze los en helpt bij de verwijdering ervan.

Otrivin Natural Aloe Vera is ook geschikt voor dagelijkse neusspoeling.

2. Alvorens het gebruik van Otrivin Natural Aloe Vera



Voorzichtig, lees voor gebruik de volgende gebruiksaanwijzing aandachtig door. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor één van de ingrediënten (zie ingrediëntenlijst).



Gebruik geen gebroken of beschadigd product.
Gebruik geen magnetron.

U dient een arts te raadplegen voordat u Otrivin Natural Aloe Vera gebruikt na een neusoperatie of -letsel. Vanwege de reinigende eigenschappen, moet u Otrivin Natural Aloe Vera als eerste gebruiken wanneer u ook een ander lokaal nasaal product gebruikt (bv. bij verkoudheid of allergische rhinitis). Otrivin Natural Aloe Vera kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap en borstvoeding, vraag raad aan uw arts of apotheker.

3. Hoe gebruikt u Otrivin Natural Aloe Vera?

De normale gebruiksfrequentie is **1 tot 2 keer per dag per neusgat**. Indien noodzakelijk kan het product zo vaak als nodig worden gebruikt.

Otrivin Natural Aloe Vera is geschikt voor kinderen ouder dan 2 jaar en volwassenen. Voor kinderen jonger dan 11 jaar moet Otrivin Natural Aloe Vera gebruikt worden onder toezicht van een volwassene.

Voor ouderen of personen met een beperking kan bij het gebruik van het hulpmiddel de hulp van een volwassene vereist zijn.

Onder normale gebruiksomstandigheden, zoals aangegeven, wordt Otrivin Natural Aloe Vera goed verdragen. Omwille van hygiënische redenen en om besmetting te voorkomen dient de neusspray slechts door één persoon te worden gebruikt.

Optimale gebruikstemperatuur is bij kamertemperatuur (gebruikelijk tussen 17°C en 25°C).

Labeling text leaflet Otrivin Aloe Vera

1. Snuit uw neus indien nodig.
2. Was uw handen zorgvuldig voor en na het gebruik van Otrivin Natural Aloe Vera.
3. Verwijder de beschermdop van de spray.
4. Als de spray gedurende langere tijd niet is gebruikt, spuit u de spray een keer in de lucht vóór gebruik. Als de tuit van de spray geblokkeerd is, kunt u deze schoonmaken met stromend water. Droog de tuit vervolgens goed af met een schone doek.
5. * Voor kinderen die het product niet zelfstandig kunnen gebruiken:
Leg het kind op zijn/haar rug met het hoofd schuin naar één kant, zodat de vloeistof gemakkelijker kan wegspoelen (fig. 1)
* Voor kinderen en volwassenen die het product zelfstandig kunnen gebruiken:
Leun het hoofd naar voren, over een wastafel, schuin naar één kant, zodat het zo horizontaal mogelijk is (fig. 2).
6. Breng de tuit in het bovenste neusgat in en spuit kort (2-3 seconden).
7. Vervolgens draait u uw hoofd naar de andere kant en herhaalt u dit in het andere neusgat.
8. Wacht een aantal seconden zodat het product kan inwerken. Snuit uw neus niet; u kunt deze wel afvegen indien nodig.
9. Daarna kunt u uw neus snuiten indien nodig.
10. Na elk gebruik, reinigt u de verstuiver onder stromend warm water. Droog vervolgens grondig met een schone doek en plaats de beschermdop op de verstuiver.
11. Reinig de verstuiver met warm water. Gebruik geen chemische materialen of afwasmiddel of ontsmettingsmiddel. Gebruik geen magnetron.



Fig 1 →



Fig 2

4. Voor uw veiligheid

Waarschuwing




Inhoud onder druk: niet blootstellen aan direct zonlicht of aan temperaturen boven 50 °C.
Spuitbus: kan bij verhitting barsten. Uit de buurt van warmte, vonken, open vuur, warme oppervlakken houden.
Verboden te roken.
De houder niet doorboren of verbranden, zelfs niet na gebruik.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit product? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Otrivin Natural Aloe Vera?

Het product buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik het product niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum die op de verpakking vermeld staat.
Bewaar de spray in de originele verpakking.

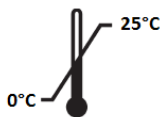

Bewaren tussen 0°C en 25 °C.

Niet invriezen.

6. Overige informatie

Ingrediënten: Aloë Vera poeder, zeewater en gezuiverd water.

Labeling text leaflet Otrivin Aloe Vera

Zonder conserveermiddelen.

Stikstof werd toegevoegd als een inert drijfgas in de houder onder druk. Het drijfgas komt niet in contact met de oplossing.

Otrivin Natural Aloe Vera is beschikbaar als een neusspray van 50 en 100 ml. Het is mogelijk dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel verkrijgbaar zijn.



GSK Consumer Healthcare SARL., Route de l'Etraz ,1197 Prangins, Zwitserland

www.otrivin.nl



Medisch hulpmiddel

Distr.: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Datum: januari 2021

Verklaring van de symbolen

	Voorzichtig
	Fabrikant
	Gebruik geen gebroken of beschadigd product
	Bewijs van overeenstemming met de EU-aerosolrichtlijn
	Bewaren tussen 0°C en 25°C
	Niet blootstellen aan zonlicht
	Houdbaarheidsdatum
	Lotnummer
	Bevoegde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap