

Otrivin Baby Monodose

Steriele Isotone Zoutoplossing met 0.74% natriumchloride

Lees aandachtig deze gebruiksaanwijzing voor u Otrivin Baby Monodose gebruikt. Indien u nog vragen heeft, stel deze dan aan uw arts, apotheker of drogist.

1. Waarom is het belangrijk om de neus grondig te spoelen?

Als een gevolg van opeenhoping van slijm, korstvorming en droogheid van het neusslijmvlies hebben baby's, kinderen en volwassenen soms moeite met ademhaling door de neus. Een overvloedige slijmproductie komt voornamelijk voor bij baby's en is een teken van een verstopte neus of een loopneus. Aangezien de baby zelf het neusslijm nog niet kan verwijderen door het neusje te snuiten, kan hij, in deze situaties, moeite hebben met ademen, eten en slapen en kan hij daardoor geïrriteerd en onrustig zijn.

De neus reinigen met behulp van een zoutoplossing kan helpen om een verstopte neus te voorkomen en te verlichten en kan in sommige gevallen helpen om complicaties zoals sinusitis en oorontsteking te voorkomen. Vooral tijdens de vroege kinderjaren, kan deze reiniging gecombineerd worden met het wegzuigen van het slijm.

2. Wat is Otrivin Baby Monodose en waarvoor wordt het gebruikt?

Otrivin Baby Monodose is een steriele, isotone zoutoplossing zonder conserveermiddelen. De zoutconcentratie is aangepast om neusirritatie te voorkomen. De oplossing bevat ricinusolie (macrogol glycerol hydroxystearaat) welke bekend is om zijn hydraterende en verzachtende eigenschappen.

Otrivin Baby Monodose wordt aanbevolen om:

- Zachtjes de neusholten te reinigen wanneer deze verstopt zijn (bv. tijdens een verkoudheid) of bij allergische aandoeningen, door het wegwassen van het overtollige slijm of de allergene deeltjes zoals stof of stuifmeel;
- Het geïrriteerde of droge neusslijmvlies te hydrateren in het geval van lichte neusirritaties of als gevolg van een lage luchtvochtigheid (bv. als gevolg van verwarmde ruimtes, ruimtes met airconditioning, bij grote hoogte, vlieguren);
- Verdunt neusafscheidingen, maakt ze los en helpt bij de verwijdering ervan.

Otrivin Baby Monodose is geschikt voor de dagelijkse neusspoeling van baby's die nog niet in staat zijn hun neusje te snuiten.

- De dagelijkse reiniging verdunt het neusslijm en helpt het overtollige slijm te verwijderen. Een te veel aan slijm kan het leven van je baby veranderen (slecht slapen, moeite met eten). Het helpt hem om te ademen en zich weer beter te voelen.
- Bij gebruik om het neusje van zuigelingen of baby's te reinigen in geval van overtollig slijm, kan Otrivin Baby Aspirator gebruikt worden net na het indruppelen van de zoutoplossing. Door het gelijktijdige gebruik van Otrivin Baby Aspirator samen met een zoutoplossing kan men het neusslijm gemakkelijker verwijderen. Zodoende vermindert men het risico op verdere complicaties zoals middenoorontsteking en neusbijholteontsteking. Het verbetert tevens de slaapkwaliteit van de baby enorm tijdens een verkoudheid.

3. Voor u Otrivin Baby Monodose gebruikt



Voorzichtig, lees voor gebruik de volgende gebruiksaanwijzing aandachtig door.

Omwille van zijn reinigende eigenschappen, kunt u Otrivin Baby Monodose het beste eerst gebruiken wanneer u ook een ander product gebruikt wat via de neus moet worden ingenomen (v.b. bij verkoudheid of allergische rhinitis).

Onder normale gebruiksomstandigheden, zoals aangegeven, wordt Otrivin Baby Monodose zeer goed verdragen.

Otrivin Baby Monodose kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap en borstvoeding, informeer bij uw arts of apotheker voordat u het gaat gebruiken.

4. Hoe gebruikt u Otrivin Baby Monodose?

De gebruikelijke frequentie van toepassing is 2 tot 4 maal per dag per neusgat.

Geschikt voor baby's, kinderen en volwassenen. Het is aangeraden om medisch advies in te winnen alvorens het te gebruiken bij zuigelingen jonger dan 2 weken.

Voor kinderen jonger dan 11 jaar moet Otrivin Baby Monodose gebruikt worden onder toezicht van een volwassene. Voor ouderen of personen met een beperking kan bij het gebruik van het hulpmiddel de hulp van een volwassene vereist zijn. Voor hygiënische redenen en om besmetting te voorkomen, mag deze flacon slechts éénmaal gebruikt worden en door één persoon. Gebruik geen geopende flacon opnieuw. Gebruikte flacons dienen te worden weggegooid.

Optimale temperatuur voor gebruik is op kamertemperatuur (gebruikelijk tussen 17°C en 30°C).

Was je handen alvorens de flacon te openen.

1. De neus snuiten indien nodig.
2. Maak 1 ampul los en verwijder het dopje.
3. Buig het hoofd achterover en breng het topje van de ampul in het neusgat.
4. Druk voorzichtig op de ampul om enkele druppels te krijgen en harder als een grondigere reiniging nodig is. Herhaal dit in het andere neusgat.
5. Wacht enkele seconden en snuit de neus indien nodig.
6. Bij gebruik om het neusje van zuigelingen of baby's te reinigen, die zelf hun neusje niet kunnen snuiten, kan een neusaspirator zoals Otrivin Baby Aspirator gebruikt te worden om het slijm te verwijderen.
7. Gooi de gebruikte ampullen weg en was uw handen.

5. Voor uw veiligheid

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Dit product is enkel voor extern gebruik, niet injecteren.

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor één van de ingrediënten (zie ingrediëntenlijst).

Niet gebruiken in de ogen.




Gebruik geen gebroken of beschadigd product.

Indien u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, informeer dan bij uw arts, apotheker of drogist.

6. Hoe bewaart u Otrivin Baby Monodose?

Niet gebruiken na de vervaldatum welke vermeldt staat op de verpakking.

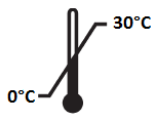

Bewaar tussen 0°C en 30°C. Niet bevriezen. Bewaren in de originele verpakking. Gooi het product weg in overeenstemming met uw lokale voorschriften en houd altijd rekening met het milieu.

7. Verdere informatie

Ingrediëntenlijst: natriumchloride, macrogol glycerol hydroxystearaat, dinatriumfosfaat-dodecahydraat, natriumdiwaterstoffosfaat-dihydraat, en gezuiverd water.

Zonder conserveermiddelen.

Otrivin Baby Monodose is beschikbaar in een verpakking van 18 ampullen van 5 ml.



GSK Consumer Healthcare SARL, Route de l'Etraz, 1197 Prangins, Zwitserland.
www.otrivin.nl



0459 medisch hulpmiddel

Datum: Januari 2021