

Otrivin Baby Aspirator – Neusjesreiniger

Voor baby's, zuigelingen en kinderen

+ 2 zachte wegwerpdopjes

Otrivin Baby Aspirator – Neusjesreiniger voor baby's, zuigelingen en kinderen.

Lees aandachtig de instructies op de verpakking alvorens dit product te gebruiken.

Neusaspiratie wordt aanbevolen bij elke verstopte neus van uw baby en dit zo vaak als nodig en vooral vóór de maaltijd van uw baby. Dit product helpt het neusje van de baby te reinigen door storend neusslijm op een zachte manier te verwijderen. De nieuwe ergonomische vorm en de soft touch zorgen voor een betere hantering. Het bevat een absorberend filter wat het slijm vasthoudt, voor een hygiënisch proces.

Otrivin Baby Aspirator is zacht voor het neusje van de baby dankzij de zachte neusdopjes, welke ontwikkeld zijn om handig in het neusje van de baby gebruikt te worden. Er worden 2 zachte wegwerpdopjes geleverd bij Otrivin Baby Aspirator. Gebruik alleen Otrivin Baby Wegwerpdopjes met de Otrivin Baby Aspirator.

Eenvoudig, veilig en hygiënisch in gebruik. Otrivin Baby Aspirator helpt uw baby normaal te ademen, te eten, te slapen en zich weer beter te voelen.

Geschikt voor baby's, peuters en kinderen. Voor gebruik bij een pasgeboren baby of bij gebruik na een verwonding of recente neusoperatie dient u eerst medisch advies in te winnen.

Niet gebruiken in geval van overgevoeligheid voor één van de materialen (zie samenstelling).

Geen gebroken of beschadigd product gebruiken. Dit geldt ook voor gebruikte of beschadigde neusdopjes of neusdopjes waarvan het filter ontbreekt of beschadigd is.

Om hygiënische redenen en om besmetting te voorkomen, zijn de neusdopjes voor éénmalig gebruik. Was uw handen zorgvuldig voor gebruik en zorg dat de verschillende onderdelen van de aspirator goed zijn gemonteerd. Na gebruik dienen de neusdopjes te worden weggegooid en het mondstuk en uw handen goed te worden gewassen.

Vraag advies aan uw arts, apotheker of drogist indien u verdere vragen heeft over het gebruik van dit product.

Hoe Otrivin Baby Aspirator te gebruiken?

1. Was uw handen zorgvuldig voor gebruik.
2. Plaats een zacht neusdopje (A) op het centraal gedeelte (B) van het toestel. Plaats geen gebruikte neusdopjes.
3. Plaats het mondstuk (C) in uw mond (ouder, verzorger) en het einde van het neusdopje (A) in één van de neusgaten van uw baby. Voor een betere werking van het hulpmiddel

(A)



is het aangeraden om het andere neusgat dicht te houden tijdens de aspiratie.

4. Zuig zachtjes, traag en regelmatig door het mondstuk (C).
5. Indien het neusdopje vol raakt tijdens een aspiratie, gebruik het neusdopje dan niet opnieuw.
6. Herhaal deze handelingen in het andere neusgat.
7. Verwijder het neusdopje (A) en gooi het weg. Was het mondstuk en het centrale gedeelte en uw handen na gebruik.




Samenstelling: Aspirator: polypropyleen, styreen-ethyleen-butyleen-styreen, siliconen.

Neusdopje: PVC en melamine schuim.

Bewaring:

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

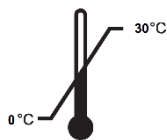

Niet bewaren onder 0°C of boven 30°C. Niet gebruiken na de vervaldatum die vermeld staat op de verpakking.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Inhoud: 1 aspirator en 2 zachte wegwerpdopjes.

Wegwerpdopjes apart verkrijgbaar.



: GSK Consumer Healthcare S.A., Route de l'Etraz, 1260, Nyon, Zwitserland.

Distributeur: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare B.V., Huis ter Heideweg 62, 3705 LZ Zeist

www.otrivin.nl

0800 4090005

nl.consumer-relations@gsk.com

Handelsmerken in eigendom van of in licentie van
GSK. ©2018 GSK-bedrijfsgroep of licentiegever.



{Use-by date expressed in YYYY-MM}



{Batch code}



Medisch hulpmiddel

Mei 2018